


# Bruksanvisning - IV-bracelet

**MERK!** Før du bruker produktet for første gang: Les gjennom hele manualen, og hvis det er noen usikkerheter, kontakt Scan-Med.a/s Norway for konsultasjon. Bruksanvisningen og instruksjonsfilmen er også tilgjengelig på vår nettside: [www.scan-med.no](http://www.scan-med.no)

**IV-armbånd bør brukes på pasienter for å fiksere intravenøse slanger slik at de følger pasientens bevegelser og også redusere risikoen for at et rykk i slangen fører til at den venøse tilgangen blir forskjøvet eller trukket ut. Produktet skal bare brukes til disse formålene.**

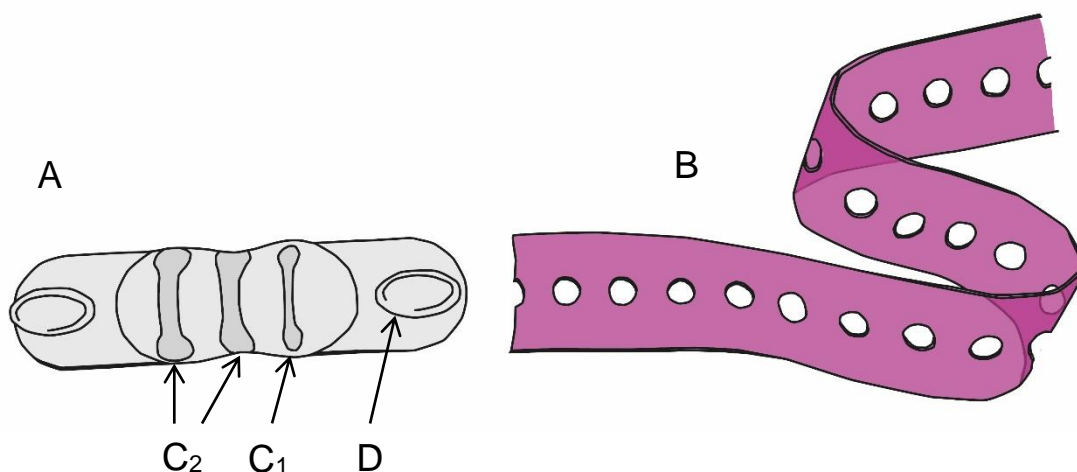

A	<b>Slangefeste (feste av slanger)</b> – Til flergangsbruk. Anbefales å brukes omtrent 100 ganger. Laget av biokompatibel silikon testet i henhold til ISO 10993 -5 og -10 og USP klasse VI.
B	<b>Elastisk bånd (bånd)</b> - For engangsbruk. Laget av biokompatibel TPE. En ekvivalent versjon av materialet er testet i henhold til ISO 10993-5 og -10 og USP klasse VI.
C	<b>Slangespor</b> - Det minste slangesporet (C <sub>1</sub> ) er beregnet på slanger med en ytre diameter på 3,5-4,5 mm, vanlig størrelse for infusjonsslanger. De to større slangesporene (C <sub>2</sub> ) er beregnet på slanger med en ytre diameter på 6-8 mm, vanlig størrelse for blodslanger til dialyse.
D	<b>Fot</b> - En del av slangefestet for å feste det elastiske båndet.



## Bruksanvisning

### IV-bracelet

- bør brukes som et supplement til bandasjer som brukes til å fikse venøse innganger
- skal anvendes av helsepersonell eller personer som har fått opplæring av helsepersonell
- kan brukes til forskjellige typer intravenøse behandlinger
- skal festet til den kroppsdel av pasienten som anses som mest egnet
- skal festes slik at den ikke kan endre stilling. OBS! Må ikke føles ubehagelig for pasienten eller hindre blodflowen.

### IV armbånd må IKKE brukes

- direkte over pasientens dialysetilgang eller venøs inngang
- rundt halsen
- på kroppsdel med ødem
- på skadet hud
- hos barn under 3 år
- hos selvmordspasienter
- hvis det anses for upassende av ansvarlig helsepersonell

## Rengjøring

Etter bruk skal det elastiske båndet og slangefestet skilles fra hverandre.

Kast båndet og rengjør slangefestet i et dekontaminator med minimum 90 grader celsius og i minst 60 sekunder (IKKE sterilisert).

Hvis det er fare for smitteoverføring, må gjeldende retningslinjer for prosedyrer i den spesifikke avdelingen følges

## Kassering

Kast skitne og skadede produkter.

Slangefestet er sortert som brennbart avfall.

Det elastiske båndet er sortert som plast.

## Risiko

- Hvis kroppsdel som båndet sitter rundt sveller, er det fare for at båndet sitter for hardt. Dette kan føre til ubehag for pasienten og føre til at blodflowen blir hindret.
- Hvis båndet er for stramt mot huden, er det fare for trykk- eller gnagsår.
- Om båndet, som er for engangsbruk, gjenbrukes, er det risiko for
  - at lengden ikke strekker til for neste pasient og dermed blir for stramt
  - det rengjøres i en dekontaminator, og dermed påvirkes av varmen
  - det ikke blir tilstrekkelig rengjort, og dermed kan overføre smitte.
- Flowen i slangen kan påvirkes midlertidig mens slangen presses inn i sporet på slangefestet.
- Flowen kan påvirkes hvis slangen ikke er riktig montert.




## Bruksanvisning

Se instruksjonsfilm på [www.scan-med.no](http://www.scan-med.no)

IV-bracelet kan festes på pasienten både før og under behandling.


1.

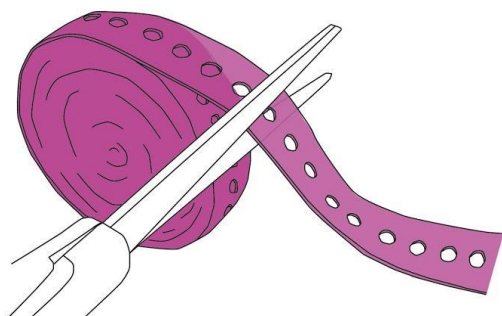

1. Ta ett slangefeste. Mål lengden på det elastiske båndet som tilsvarer omkretsen til den valgte kroppsdelen av pasienten, legg til ca. 5 cm. Klipp av båndet gjennom et hull.


Forsikre deg om at både slangefestet og det elastiske båndet er rene og uten synlige skader som kan påvirke deres funksjon. Ikke bruk skitne eller skadede produkter.

2.

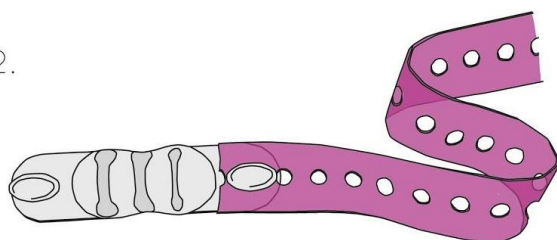

2. Ta slangefastet og tre det ytterste hullet i stroppen over den ene foten slik at foten kommer helt gjennom hullet.

3.

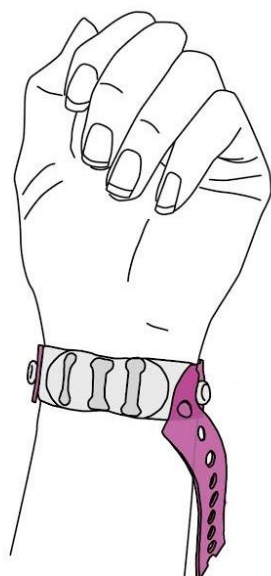


3. Plasser slangefestet på pasienten, før det elastiske båndet rundt den valgte kroppsdelen. Tre hullet i båndet som gir god passform over den andre foten av slangefestet. Når du velger mellom to hull, velger du den som resulterer i en litt løsere passform, men ikke så løs at produktet kan endre stilling. Pass på at formen på hullene holder seg rund og ikke blir oval. Hvis hullene er ovale, har stroppen blitt strammet for stramt og må justeres. **Når du fester slangene, er det viktig at det er nok slakk på slangen mellom inngangen og armbåndet, slik at den ikke kan strekkes for mye når pasienten beveger seg.**

Støtt slangefestet nedenfra med en finger for å unngå press på pasienten når slangen skal festes. Begynn med å skyve ned slangen i den ene enden av sporet og fortsett å skyve ned slangen i hele sporet, helt ned til bunnen. **OBS: Ikke start med å presse slangen ned midt i sporet, da det er minst plass der.**



4.

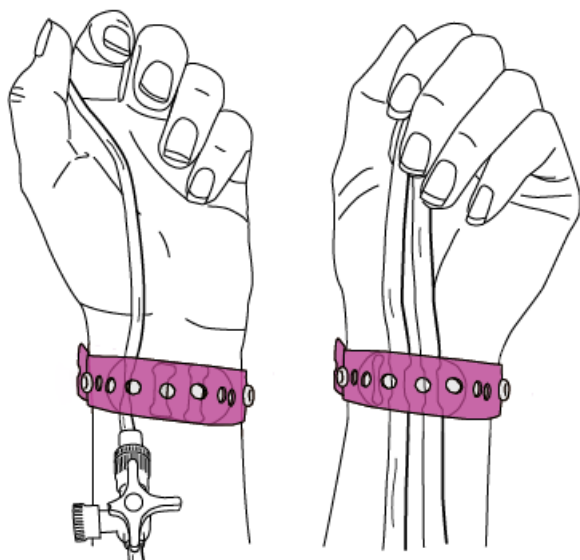

Infusjon

Dialyse

Bruk ikke et tomt spor for å direkte snu slangen i en U-sving. I instruksjonsvideoen vises hvordan man lager en sikker U-sving.

4. Når slangen er på plass, må du feste den ytterligere ved å føre den gjenværende delen av det elastiske båndet over slangefestet og tre den i foten på den andre siden.

Klipp av overflødig bånd, men lagre minst ett hull for å kunne justeres etterpå.

Sjekk at væskenflowen er som den skal.

## Sjekkliste

- Mål lengden på det elastiske båndet som kreves for at det kan nå en gang rundt den kropsdel som er valgt og legg til ca. 5 cm. Klipp av båndet gjennom et hull.
- Forsikre deg om at både slangefestet og det elastiske båndet er rene og uten synlige skader.
- Fest elastiske båndet i slangefestet og fest den til pasienten.
- Forsikre deg om at produktet ikke hindrer blodflowen eller endrer posisjon.
- Forsikre deg om at det er nok slakk på slangen mellom venøs tilgang og armbånd, slik at slangen ikke blir for stram når pasienten beveger seg.
- Plasser slangen/slangene på riktig plass (er).
- Trekk det gjenværende stykke elastikkbåndet over slangefestet og fest på den andre siden.
- Klipp av overflødig bånd, men lagre minst ett hull for å kunne justeres etterpå.
- Kontroller at væsken renner gjennom slangen som den skal.



Hvis alvorlige hendelser oppstår i forbindelse med bruk av produktet IV-bracelet, må disse rapporteres til Medow AB og vedkommende myndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

