


Brugsvejledning - IV-bracelet

Bemærk: før brug første gang bedes HELE brugsvejledningen læst igennem. Hvis der er tvivl eller yderligere spørgsmål, kontakt da venligst NorDiaTech for support.

Brugsvejledningen og en instruktionsvideo kan også findes på www.nordiatech.dk

IV-bracelet skal bruges på patienter til at fiksere intravenøse slanger, så de følger patientens bevægelser, men også for at mindske risikoen for at et træk i slangen løsner den eller får den til at falde ud. Produktet må kun anvendes til dette formål.

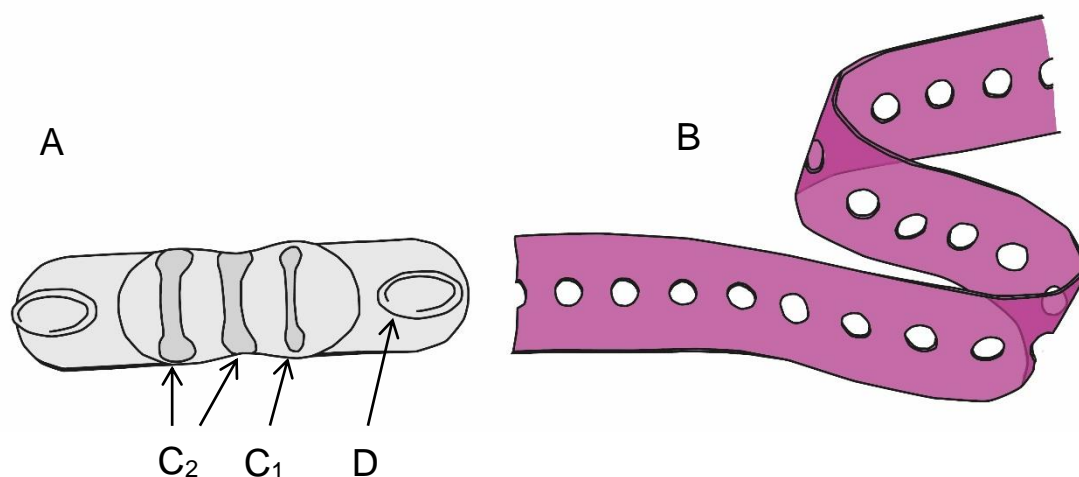

A	Slangeholderen (holder slangerne) – Genanvendelig. Anbefalet antal genbrug: ca. 100 gange. Lavet af biokompatibelt materiale, som er testet i henhold til ISO 10993-5 og -10 og også USP-klasse VI.
B	Båndet – Engangsbrug. Lavet af biokompatibel TPE. En tilsvarende version er blevet testet i henhold til ISO 10993-5 og -10 og også USP-klasse VI.
C	Slangerille (udstansning) – Den mindste slangerille (C ₁) bruges til slanger med en ydre diameter på 3,5 - 4,5 mm, - almindelig størrelse for infusionsæt. De to største slangeriller (C ₂) anvendes til slanger med en ydre diameter på 6-8 mm, - almindelig størrelse for dialyseslanger.
D	Fastgørelsesfod – En del af slangeholderen til at fastgøre båndet på.



Instruktion

IV-bracelet

- bør bruges som et supplement til forbindinger, der bruges til at fiksere karadgangsprodukter
- skal bruges af sundhedspersonale eller brugere der er uddannet i sundhedsvæsenet
- kan bruges til forskellige former for intravenøse behandlinger
- skal fastgøres til den kropsdel på patienten, der anses for bedst egnet
- skal fastgøres således, at den ikke kan ændre position. BEMÆRK: det må ikke føles ubehageligt for patienten eller begrænse blodflowet.

IV-bracelet må IKKE bruges

- direkte ovenpå patientens dialyseadgang eller det venøse karadgangsprodukt
- rundt om halsen
- på kropsdele med ødem
- på skadet hud
- på børn under 3 år
- på selvmordstruede patienter
- hvis det anses for upassende af en ansvarlig sundhedsfaglig person.

Rengøring og desinfektion

Efter brug skal slangeholderen og båndet adskilles.

Kassér båndet og rengør slangeholderen i en desinficerende opvaskemaskine ved minimum 90°C i mindst 60 sekunder (IKKE steriliseret).

Hvis der er risiko for at overføre infektioner, skal de gældende retningslinjer for procedurer i den specifikke enhed følges.

Bortskaffelse

Kassér urene eller slidte produkter.

Slangeholderen betragtes som brændbart affald.

Båndet skal betragtes som plastik.

Risici


- Hvis kropsdelen, som IV-bracelet er fastgjort til, hæver, er der risiko for, at båndet bliver for stramt. Dette kan medføre ubehag for patienten og begrænse blodflowet.
- Hvis båndet er for stramt, er der risiko for tryk- eller gnavesår.
- Hvis engangsbåndet genbruges, er der risiko for at:
 - At længden ikke er tilpasset næste patient og båndet er derfor sat for tæt
 - Det rengøres i vaskemaskinen, og materialet dermed påvirkes af varmen
 - Det rengøres ikke tilstrækkeligt og øger dermed muligheden for infektion.
- Flowet i slangen kan blive påvirket midlertidigt, mens slangen presses på plads i slangeholderens slangerille.
- Flowet kan blive påvirket, hvis slangen ikke er sat korrekt på plads i slangerillen.



Brug


Der findes også en instruktionsvideo på www.nordiatech.dk

IV-bracelet kan påføres både før og under behandlingen.

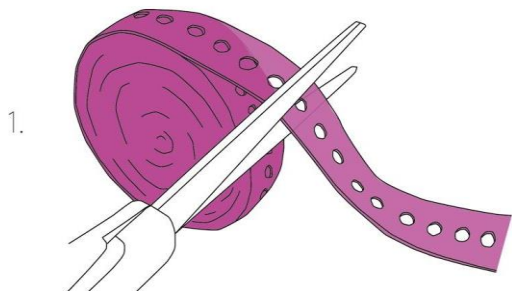


1. Tag en slangeholder. Mål længden af elastikbåndet, som svarer til omkredsen af den valgte kropsdel hos patienten, **tilføj ca 5 cm ekstra**. Klip båndet gennem et hul.

Sørg for at både slangeholderen og båndet er synligt rene og ikke bærer spor af skader, der kan genere patienten eller nedsætte funktionaliteten. Brug ALDRIG urene eller beskadigede produkter.

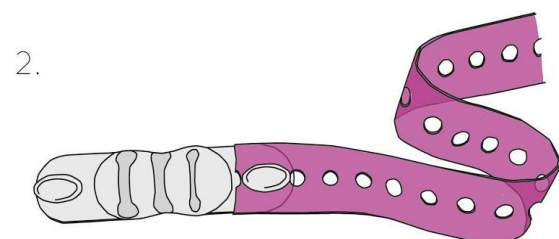

2. Tag slangeholderen og sæt en af fastgørelsesfødderne helt igennem hullet i den ene ende af båndet.

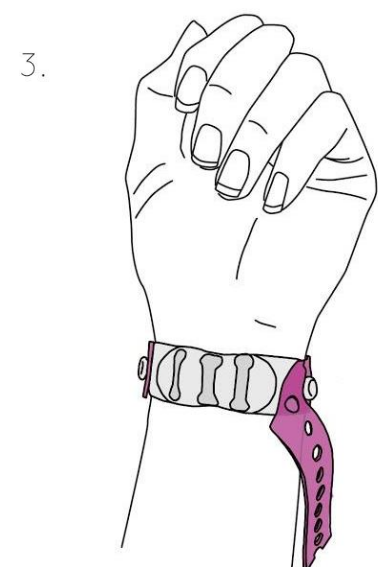


3. Placér slangeholderen på patienten, før båndet rundt om den valgte kropsdel. Tjek at det passer, uden at stramme og fastgør båndet til den anden fastgørelsesfod på slangeholderen. Hvis der skal vælges mellem to huller, vælges det hul, hvor båndet bliver en anelse løsere. Det må dog ikke være så løst, at IV-bracelet kan ændre position. Kontroller at hullerne forbliver runde og ikke bliver ovale. Er de ovale, er båndet for stramt og skal løsnes!

Ved tilslutning af slangerne er det vigtigt at sikre, at slangens del mellem karadgangsproduktet og IV-bracelet er løst nok, så det ikke kan blive fuldt udstrukket, når patienten bevæger sig.

Slangeholderen støttes fra undersiden med en finger for at undgå tryk ind mod patienten, når slangen fastgøres. Start med at trykke slangen ned i den ene ende af slangerillen og fortsæt med at trykke slangen ned langs med slangerillen hele vejen ned. **BEMÆRK:** start **IKKE** med at presse slangen ned midt i slangerillen, da der er mindst plads der!



4.

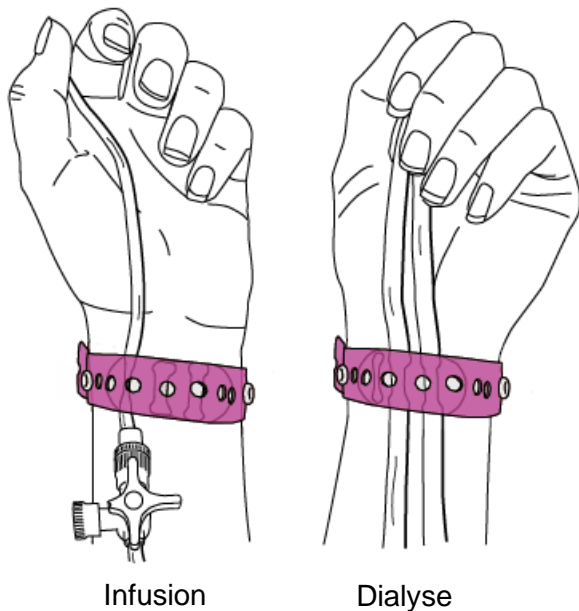

Anvend ikke de tomme huller i båndet remmen for at vende slangen tilbage og foretage en U-drejning. I instruktionsfilmen vises hvordan man laver en sikker U-drejning.

4. Når slangen er på plads i slangerillen, **skal det sikres yderligere med den resterende del af båndet, som fastgøres på den anden side af slangeholderen henover slangen.**

Klip den overskydende del af båndet af, men efterlad mindst et hul, så det er muligt at justere det. Kontroller, at væsken løber inde i slangen, som den skal.

Tjekliste

- Mål længden af det elastiske bånd, der kræves for at nå en hel omgang rundt om den valgte kropsdel hos patienten, og tilføj ca. 5 centimeter. Klip båndet gennem et hul.
- Kontroller at både slangeholderen og båndet er synligt rene og uden nævneværdige skader.
- Fastgør båndet til den ene fastgørelsesfod på slangeholderen og fastgør IV bracelet på patienten.
- Kontroller at produktet ikke begrænser blodflowet og at slangen ikke kan ændre position.
- Kontroller at slangens del mellem karadgangsproduktet og IV-bracelet er løst nok til ikke at blive strakt helt ud, når patienten bevæger sig.
- Fastgør slangen i den korrekte slangerille på slangeholderen.
- Dæk slangeholderen med den resterende del af båndet, og fastgør det i den anden side med den anden fastgørelsesfod.
- Klip den overskydende del af båndet af, men efterlad mindst et hul, så det er muligt at tilpasse det. Igen: klip igennem et hul.
- Kontroller at væsken strømmer igennem slangen som den skal.

CE

Hvis der opstår alvorlige hændelser i forbindelse med brugen af IV-armbånd, skal disse rapporteres til Medow AB og Den kompetente myndighed der hvor brugeren eller patienten er etableret.

